



# iScale<sup>®</sup> Plus


GUÍA DE INICIO RÁPIDO Báscula de peso celular  
Modelo SMSC2001-G-001


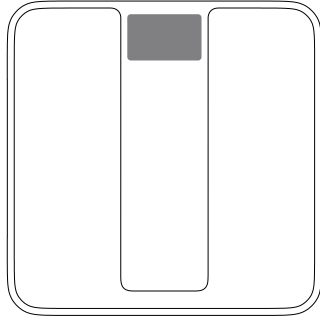



 SMARTMETER  
Engaging Health Data

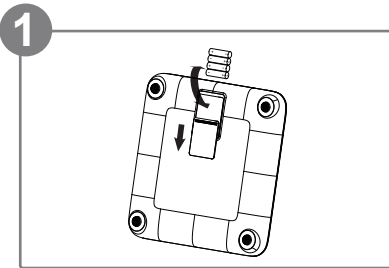


1 Inserte las baterías. El dispositivo se inicializará para asegurarse de que la conexión esté funcionando.

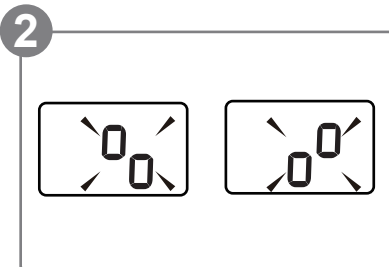

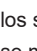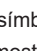2 Verá los íconos parpadear en la pantalla LCD, luego los símbolos  y  se mostrarán alternativamente en la Pantalla LCD, indicando que se está estableciendo conexión.


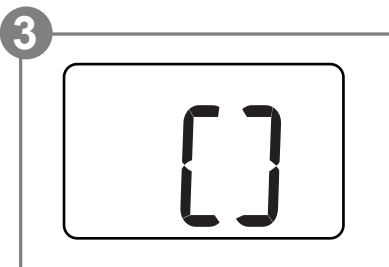


3 Cuando se muestra el símbolo [ ] en la pantalla LCD, esto indica que la conexión se realizó correctamente. Luego el dispositivo se apagará automáticamente.

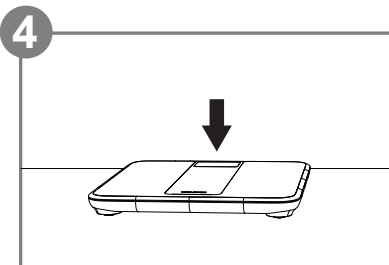


4 Coloque la báscula en el suelo. Asegúrese de que el piso sea plano y no resbaladizo por motivos de seguridad.

Lit #: SC-IPCQG-U-0223

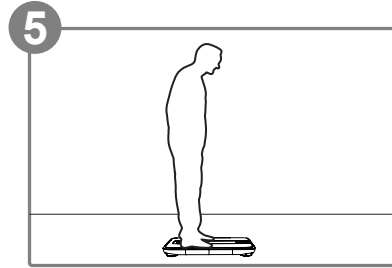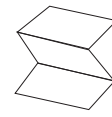


5 Súbase a la báscula y manténganse estable hasta que se muestre el peso.

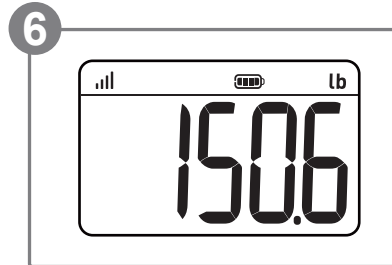



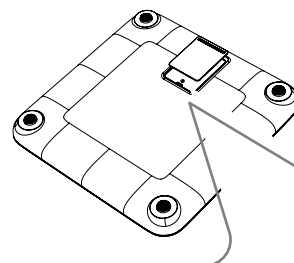
6 Los resultados se mostrarán y se guardarán automáticamente.




7 La transmisión de datos comenzará después de la medición. El símbolo  parpadea en la pantalla LCD para indicar que se están transmitiendo datos.

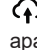

8 Si los datos se transmiten exitosamente, el símbolo  desaparecerá y  aparecerá en la pantalla LCD y luego el dispositivo se apagará.



Abra la tapa de la batería, verá el botón negro de la unidad aquí abajo, presiónelo para cambiar las unidades de peso.

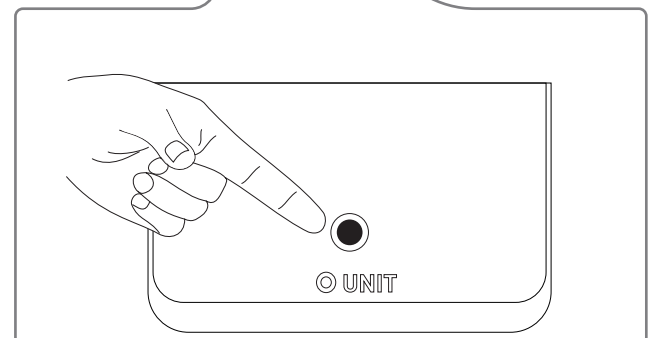

Para obtener más información, consulte el manual de usuario completo o comuníquese con el soporte técnico de Smart Meter, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m., hora del Este, al 1-844-445-8267 o por correo electrónico: [support@iglucose.com](mailto:support@iglucose.com)