


产品型号	GBS-2104-G	产品名称	iScale			零件名称	Guía de inicio rápido 快速指南
成品尺寸	A4: 210*297mm	比例	1:1	单位	mm	材料工艺	157g铜版纸, 双面印刷, 哑胶
印刷色值	■ CMYK: 84/58/0/0	■ CMYK: 2/34/84/0	■ Pantone 279C	■ CMYK: 15/0/0/0			

iScale®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CÓMO UTILIZAR MEJOR SU NUEVO iScale

1

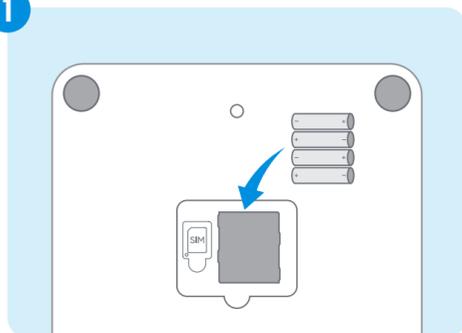

INSERTAR LAS BATERÍAS

Inserte 4 baterías AA en el compartimento de las pilas. Tenga en cuenta los signos positivos y negativos para garantizar que las baterías estén instaladas correctamente.

2



TOMAR SU PESO

Súbese al iScale con ambos pies. Bájese cuando el peso aparezca y parpadee dos veces.


3



TRANSMISIÓN DE DATOS


- Una vez que el peso aparezca y parpadee dos veces, iScale transmitirá su peso.
- Cuando vea "OK" en la pantalla, sus datos se han transmitido correctamente.
- Si ve "📶", su transferencia de datos falló. Sus datos se almacenarán temporalmente en iScale hasta la próxima transmisión.
- No podrá realizar otra medición hasta que aparezca "OK" o "📶" en la pantalla.

SELECCIONAR UNA UNIDAD DE MEDIDA

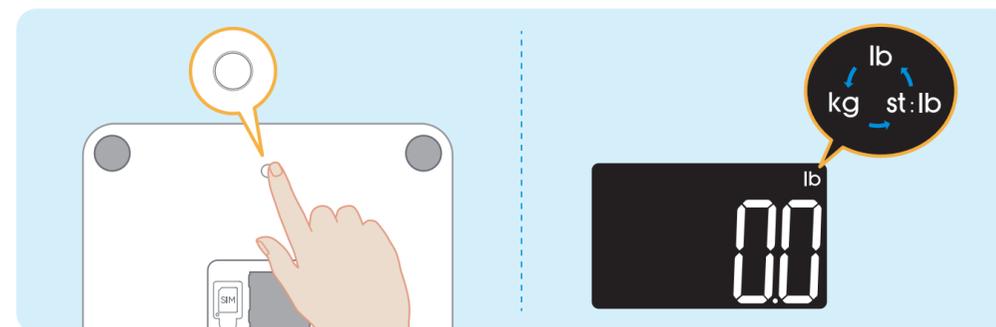

Busque el botón redondo en la parte posterior del iScale antes de tomar su peso. Presione este botón para cambiar la unidad de medida. Debería ver que la unidad de medida seleccionada se muestra en la pantalla.

CÓMO OBTENER LECTURAS EXACTAS

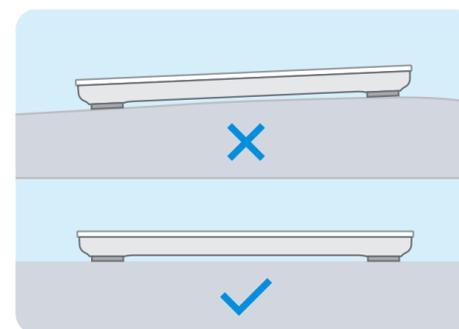


- Coloque su iScale sobre una superficie plana y dura.
- No lo utilice sobre una superficie alfombrada.



- Súbese al iScale con los pies limpios y descalzos.
- Use la menor cantidad de ropa posible para obtener una lectura más precisa.



- No doble las rodillas ni se mueva al pesarse

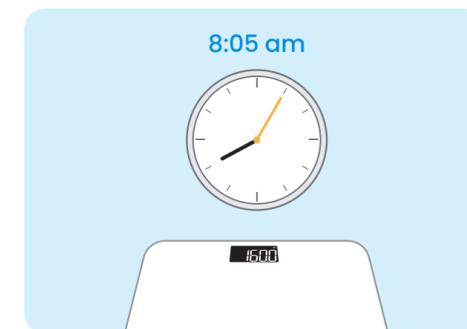

- Intente pesarse a la misma hora todos los días.